



### **Kalibraatio\_**

Laite ilmoittaa itse kalibraatiotarpeesta. Kalibraatio on kätevinä suorittaa meidän huollossamme. Mikäli haluat lähettää laitteen huoltoon, ole hyvä ja täytä huollon yhteydenottokortti. Tämä löytyy sivuiltamme kohdasta "Myynti, asiakaspalvelu ja huolto". Kalibraatio voidaan myös suorittaa asiakkaan lääkintälaittehuollon toimesta.

Seuraavat mittausparametrit vaativat vuosittaista kalibraatiota:

- Non-invasiivinen verenpaineen mittaus (NiBp)
- ETCo2

Lisäksi akku on kalibroitava kuuden (6) kuukauden välein. Akun kalibraatio-ohjeet löydät käyttöohjeesta kohdasta Akkujen kalibrointi.

### **Huolto**

Laite on kätevinä huoltaa meidän huollossa. Mikäli haluat lähettää laitteen huoltoon, ole hyvä ja täytä huollon yhteydenottokortti. Tämä löytyy sivuiltamme kohdasta "Myynti, asiakaspalvelu ja huolto". Huollon yhteydessä laite huolletaan, kalibroidaan ja päivitetään viimeisimpään softaversioon.

### **Softaversiot**

Viimeisin julkaistu softaversio on: 8:00

Keskeisimmät muutokset / korjaukset:

- Trendit mitatuista parametreistä. Trendejä voidaan selata 12 h taaksepäin ja tarkastella erilaisilla näyttöväleillä.
- Valmius kahden invasiivipaineen ja lämpötilan mittaamiseen, tilattava erikseen

Edelliset julkaistut softaversiot:

B06:00

Keskeisimmät muutokset / korjaukset:

- QCPR (laadukkaan peruselvytyksen palaute) valmius, ominaisuus on tilattava erikseen
- Tukee 256M datakortteja

Huoltomme päivittää aina huollon yhteydessä MRx laitteisiin viimeisimmän softaversioon.

Lääkintälaittehuollon on myös mahdollista päivittää MRx:n softaversio. Pyydä lääkintälaittehuoltoasi olemana yhteydessä asiakaspalveluumme, softa toimitetaan lääkintälaittehuoltoon sähköpostilla. Softapäivitys suoritetaan käyttämällä MRx:n datakorttia. Softaversiot <- B.06:00 tukevat vain 64M tai pienempiä datakortteja. B.06.00 ja uudemmat tukevat 256M kortteja.

### **Muuta**

Varmistathan, että laitteen verkkosuodin on asetettu 50Hz:iin. Tarkemmat tiedot verkkosuotimen muuttamisesta käyttöohjeesta kohdasta Asetusten muokkaaminen.

Tämä ohje päivitetty 15.8.07

Muutokset:

Lisätty softa 8.00 ominaisuudet